

Multi-Gyn® Kompresser

Multi-Gyn®

SE

LÄS IGENOM DENNA PRODUKTINFORMATION INNAN ANVÄNDNING OCH SPARA DEN FÖR FRAMTIDA BRUK.

MULTI-GYN KOMPRESSER VÅRDAR DET YTTRE INTIMOMRÅDET

- Lugnande effekt på känslig hud
- Stödjer hudens naturliga läkningsprocess
- Unik mjuk, skyddande kompress
- Idealisk för användning efter förlossning

INDIKATION

För lindring av besvär i det yttre delarna av intimområdet som blygdläppar, vulva och ändtarmsområde. Lugnar känslig hud och stödjer hudens naturliga läkningsprocess.

SÅHÄR FUNGERAR MULTI-GYN KOMPRESSER

Multi-Gyn Kompresser lindrar besvär i de yttre delarna av intimområdet som blygdläppar, vulva och ändtarmsområde. Lugnar känslig hud och stödjer hudens naturliga läkningsprocess. Ideal att använda efter förlossning. Varje kompress är impregnerad med gel. Denna naturliga gel är baserad på det patenterade 2QR-komplexet. Kompressen placeras mot det berörda området där den skyddar och hjälper till att skapa en optimal miljö för den naturliga läkningsprocessen. Kompressens utsida är laminerad. Gelén fläckar inte ner underkläder.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Öppna påsen, vik upp kompressen och placera den gelimpregnerade sidan mot det berörda området. Låt kompressen sitta på så länge som önskas, men under minst 10 minuter. För att underlätta att kompresserna hålls på plats kan du använda åtsittande underkläder. Använd en ny kompress två gånger per dag tills problemen lindrats. Kompressen är endast avsedd för engångsbruk. Kassera kompressen efter användning av hygieniska skäl.

MULTI-GYN KOMPRESSER ÄR BASERADE PÅ NATURLIGA INGREDIENSER

Multi-Gyn Kompresser är en naturlig produkt baserad på det patenterade bioaktiva 2QR-komplexet. Den har ingen doft, är fri från hormoner och innehåller inga ingredienser av animaliskt ursprung.

INGREDIENTS

Aloe Barbadensis Leaf Polysaccharides, Aqua, 1,3-Butylene glycol, Glycerin, Citric Acid, Laureth-9, Oleth-20, Xanthan Gum, Sodium hydroxide, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Caprylyl Glycol, Allantoin, Aluminium hydroxide, Escin

Aktiv huvudingrediens 2QR-komplex: Patenterade bioaktiva polysackarider som utvinns ur Aloe Barbadensis bladextrakt.

GRAVIDITET OCH AMNING

Det finns inga kända kontraindikationer för att använda Multi-Gyn Kompresser under graviditet och amning.

För mer information: www.multi-gyn.se

BAKGRUNDSINFORMATION

Besvär i det yttre intimområdet (vaginal och anala) är vanligare än du kanske tror. Många kvinnor känner igen problem som irritation, ömhet, svullnad och mindre vävnadsskador. Dessa problem kan uppkomma av flera olika anledningar till exempel från mekanisk friktion (från kläder eller sport), menstruationscykler, samlag, infektion, åldrande, tvål, mediciner eller kronisk förstoppning. Besvär i det yttre intimområdet är särskilt vanligt under graviditet och efter förlossning. Under denna period är påfrestningar på intimområdet större än normalt. Dessa små problem kan vara väldigt besvärliga. Multi-Gyn Kompresser är den effektiva och naturliga lösningen på alla sådana besvär.

DK

LÆS DENNE BRUGSANVISNING FØR DU ANVENDER MULTI-GYN KOMPRESSER OG GEM DEN TIL SENERE REFERENCE.

MULTI-GYN KOMPRESSER PLEJER DET YDRE INTIMOMRÅDE

- Beroligende effekt på følsom hud
- Understøtter hudens naturlige helingsproces
- Unik blød og beskyttende kompres
- Ideel til anvendelse efter fødsel

ANVENDELSE

Til brug for udvendig intim pleje af vulva og skamlæber, vaginalt og analt område. Beroliger følsomhed og understøtter hudens naturlige helingsproces. Særlig velegnet til brug efter fødsel.

HVORDAN VIRKER MULTI-GYN KOMPRESSER

Multi-Gyn Kompresser beroliger følsom hud i det intime område og understøtter heling. Ideel til brug efter fødsel. Hver kompres er blevet impregneret med en gel. Den naturlige gel er baseret på det patenterede 2QR-kompleks. Kompresset placeres på det intime område, hvor det danner en blød beskyttende barriere og hjælper med at danne optimale betingelser af den naturlige helingsproces. Ydersiden af kompresset er lamineret. Gelen pletter ikke undertøj.

BRUGSANVISNING

Åbn posen, fold kompresset ud og placer det med den impregnerede side på det berørte område. Lad kompresset sidde så længe som det ønskes, men i mindst 10 minutter. For at sikre kompresset bliver på plads anbefales det at bruge tætsiddende undertøj. Brug en ny kompres to gange daglig indtil symptomerne er lindret. Kompresset er udelukkende til engangsbrug. Bortskaf kompresset efter brug af hygieiniske årsager. Opbevares ved 10-25°C.

MULTI-GYN KOMPRESSER ER BASERET PÅ NATURLIGE INGREDIENSER

Gelen i Multi-Gyn Kompresser er baseret på naturlige ingredienser og indeholder 2QR-complex. Produktet indeholder ingen duft, hormoner og ingredienser af animalsk oprindelse

INGREDIENTS

Aloe Barbadensis Leaf Polysaccharides, Aqua, 1,3-Butylene glycol, Glycerin, Citric Acid, Laureth-9, Oleth-20, Xanthan Gum, Sodium hydroxide, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Caprylyl Glycol, Allantoin, Aluminium hydroxide, Escin

Aktiv hovedingrediens: 2QR complex: Patenterede bioaktive polysackarider udvundet af Aloe Barbadensis blad ekstrakt.

GRAVIDITET OG AMNING

Der er ingen kendte kontraindikationer ved brug af Multi-Gyn Kompresser under graviditet og amning.

For mere information se www.multi-gyn.dk

BAGGRUNDSINFORMATION

Ubehag i det ydre intime område (vaginalt og analt) er mere almindeligt, end du måske tror. Mange kvinder genkender problemer som: Irritation, følsomhed, hævelse og mindre vævsskader. Disse problemer kan have mange forskellige årsager, som for eksempel: mekanisk friktion (fra tøj eller sport), menstruationscyklus, sex, aldring, sæber, medicin eller kronisk forstoppelse. Især under graviditet og efter fødsel er dette meget almindeligt. I denne periode er der meget mere pres på det intime område end normalt. Presset resulterer ofte i eksterne intime ubehag. Disse små problemer kan være meget ubehagelige. Multi-Gyn Kompresser er den effektive og naturlige løsning på sådanne ubehag.

BioClin BV, Delftechpark 55,
2628 XJ Delft, The Netherlands

WWW.MULTI-GYN.SE / WWW.MULTI-GYN.DK

revision date: May 2020



TBSE1701.3