

Multi-Gyn® FloraPlus

Multi-Gyn®

LÄS HELA DENNA INFORMATIONSBROSCHYR NOGA INNAN DU ANVÄNDER MULTI-GYN FLORAPLUS OCH SPARA DEN FÖR FRAMTIDA LÄSNING

MULTI-GYN FLORAPLUS BEHANDLAR VAGINAL SVAMP

- + Direkt lindring av klåda, irritation och grygiga vita flytningar
- + Innehåller prebiotika
- + Skapar ett optimalt pH-värde i vaginan
- + Baserad på naturliga ingredienser

INDIKATIONER

Kvinnor som besväras av symptom relaterade till vaginal svamp. Multi-Gyn FloraPlus är effektiv för behandling av vaginal svamp och symptom som klåda, irritation och smuliga vita flytningar.

Behandlar eller förebygger ej sexuellt överförbara sjukdomar.

HUR VERKAR MULTI-GYN FLORAPLUS

Multi-Gyn FloraPlus är baserad på naturliga ingredienser och det patenterade, bioaktiva 2QR-komplexet i kombination med prebiotika. 2QR-komplexet är en naturlig växtbaserad substans som har den unika förmågan att blockera skadliga bakterier och svamp från att få fäste i vaginan och på slemhinnan. "Dåliga" mikroorganismer neutraliseras samtidigt som de "goda" laktobacillerna främjas för att återställa en optimal vaginal bakterieflora. Denna unika kombination gör Multi-Gyn FloraPlus idealisk för att behandla vaginal svamp och återställa vaginans bakterieflora och pH.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

För behandling av vaginal svamp, använd 1 engångsdos precis innan du går och lägger dig under 5 dagar i rad. Om dina symptom kvarstår eller återkommer bör du kontakta din läkare. Multi-Gyn FloraPlus skall inte användas längre än 30 dagar i följd, för att låta den vaginala bakteriefloran reglera sig själv.

VÄNLIGEN OBSERVERA


Du kan uppleva en brännande och/eller stickande känsla direkt efter applicering. Detta är normalt och denna känsla brukar vanligtvis gå över hastigt.

MULTI-GYN FLORAPLUS ÄR BASERAD PÅ NATURLIGA INGREDIENSER

Multi-Gyn FloraPlus innehåller inte hormoner, ingredienser av animaliskt ursprung eller parfym.


HUR MAN ANVÄNDER MULTI-GYN FLORAPLUS

Multi-Gyn FloraPlus är en prebiotisk vaginalgel som appliceras direkt i slidan. Varje tub innehåller en dos. Den prebiotiska gelen införs i slidan med hjälp av den specialutformade applikatorn. Kassera tuben efter användning. Följ anvisningen för engångstuben enligt nedan bilder.

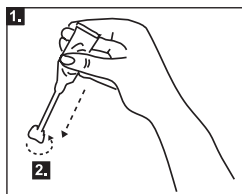


1. Skaka innehållet mot toppen av tuben.


2. Vrid av toppen.

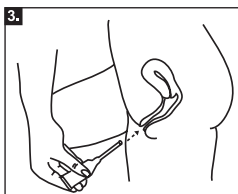

3. Håll tuben i ena handen och försiktigt upp den tunna delen av applikatorn i slidan.

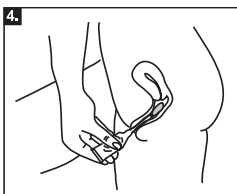

4. Kläm försiktigt i den tjocka delen av tuben för att trycka ut gelen i slidan.

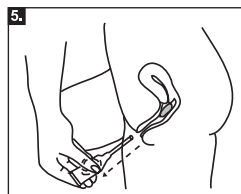

5. Fortsätt att hålla tuben sammanpressad då du drar ut den ur slidan. Kasta tuben efter användning.

Obs! Tuben är utformad för att avge rekommenderad mängd gel. När den används enligt anvisningarna, kommer en liten mängd gel att bli kvar i tuben.

HUVUDINGREDIENSER

Galaktoarabinan Polyglukuronsyrakrosopolymer*, prebiotika (Laktitol och FOS). *2QR-komplex: patenterade bioaktiva polysackarider. www.2QR.com

ALLERGIINFORMATION

Allergier mot ingredienserna i Multi-Gyn FloraPlus är mycket ovanliga. Vid tveksamhet, applicera en liten mängd gel på insidan av underarmen. Om en klåande, röd fläck framträder avråds användning av Multi-Gyn FloraPlus.

BIVERKNINGAR

Det finns inga kända biverkningar. Men, eftersom Multi-Gyn FloraPlus har en optimal surhetsgrad (lågt pH) för vaginan och sperma är alkaliskt (høgt pH), kan spermernas aktivitet hämmas vid användningen av Multi-Gyn FloraPlus. Därför bör FloraPlus inte användas några timmar efter samlag om du önskar bli gravid.

INVERKAN PÅ LÄKEMEDELSANVÄNDNING

Multi-Gyn FloraPlus har ingen känd påverkan på andra läkemedel.

GRAVIDITET OCH AMNING

Det finns inga kända kontraindikationer vad det gäller användning av Multi-Gyn FloraPlus under graviditet eller amning.

ANVÄNDNING MED KONDOMER OCH PESSAR

Multi-Gyn FloraPlus effekt på kondomer och pessar är ökad.

FÖRVARING

Multi-Gyn FloraPlus bör förvaras vid 10°C - 25°C (rumstemperatur). Förvara Multi-Gyn FloraPlus utom räckhåll för barn. Använd inte Multi-Gyn FloraPlus efter utgångsdatumet.

WWW.MULTI-GYN.SE

revision date: May 2020



TBSE1801.4



Tillverkare:
BioClin BV, Delftechpark 55,
2628 XJ Delft, The Netherlands

Multi-Gyn® FloraPlus



LÆS DENNE INDLÆGGSSEDEL OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER MULTI-GYN FLORAPLUS OG OPBEVAR DEN TIL SENERE BRUG.

MULTI-GYN FLORAPLUS BEHANDLER PROBLEMER MED VAGINAL SVAMP

- + Direkte lindring af kløe, irritationer og smuldrende, hvidt udflød
- + Indeholder præbiotika
- + Har den ideelle pH værdi for en sund skede
- + Baseret på naturlige ingredienser

INDIKATIONER

Kvinder, der lider af de ubehagelige symptomer, der er relateret til vaginal svamp. Multi-Gyn FloraPlus er yderst effektiv til behandling af vaginal svamp og relateret ubehag som kløe, irritationer og smuldrende, hvidt udflød.

Behandler eller forhindrer ikke seksuelt overførte sygdomme.

HVORDAN VIRKER MULTI-GYN FLORAPLUS

Multi-Gyn FloraPlus er baseret på naturlige ingredienser og det patenterede, bioaktive 2QR-complex i kombination med præbiotika. 2QR-complexet er et naturligt planteudvundet stof, der har den unikke evne til at blokere skadelige bakterier og svamp mod at fastgøre sig til vaginalvæggen og slimhinden. Skadelige mikroorganismer neutraliseres sikkert. Samtidig understøtter præbiotika de gavnlige lactobacillusbakterier for at gendanne en optimal vaginal flora. Denne unikke kombination gør Multi-Gyn FloraPlus ideel til behandling af problemer med vaginal svamp og genoprettelse af sundhed i skeden.

BRUGSANVISNING

Til behandling af problemer med vaginal svamp skal du bruge en tube med en enkelt dosis lige inden du går i seng i 5 på hinanden følgende dage. Hvis dine gener vedvarer eller kommer igen, skal du kontakte din læge. Multi-Gyn FloraPlus bør ikke bruges i mere end 30 på hinanden følgende dage. Dette gør det muligt for vaginalfloraen at regulere sig selv uden yderligere behandling.

BEMÆRK


Du kan opleve en brændende og/eller prikkende fornemmelse efter påføring. Dette er normalt, og følelsen forsvinder hurtigt.

MULTI-GYN FLORAPLUS ER BASERET PÅ NATURLIGE INGREDIENSER

Multi-Gyn FloraPlus indeholder ikke hormoner, ingredienser af animalsk oprindelse eller parfume.


HVORDAN BRUGES MULTI-GYN FLORAPLUS

Multi-Gyn FloraPlus er en præbiotisk vaginal gel, der påføres direkte i skeden. Hver tube indeholder en enkelt dosis til påføring. Tegningerne nedenfor viser, hvordan du skal bruge en enkelt dosis-tube. Kassér tuben efter brug.

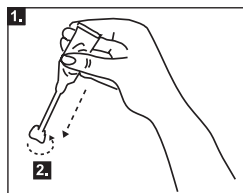


1. Ryst tubens indhold mod tubens spids.


2. Knæk spidsen af tuben ved at dreje den.

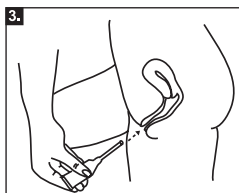

3. Før forsigtigt den tynde ende af applikatoren (på tuben) ind i skeden.

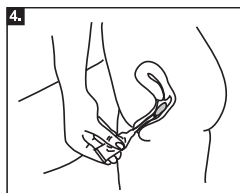

4. Klem forsigtigt på tuben for at skubbe gelen ind i skeden.

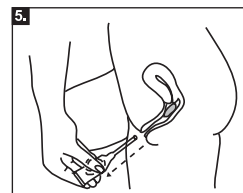

5. Fortsæt med at klemme på tuben, mens du fjerner den.

Bemærk: Tuben er designet til at påføre den anbefalede mængde gel. Når produktet anvendes som anført, forbliver en lille mængde gel i tuben.

HOVEDINGREDIENSER

Galactoarabinan polyglucuronsyre krydspolymer *, præbiotika (Lactitol og FOS).

* 2QR-complex: patenterede bioaktive polysakkarider.

ALLERGIINFORMATION

Allergier over for ingredienserne i Multi-Gyn FloraPlus er meget sjældne. Hvis du er i tvivl, kan du teste en lille mængde på indersiden af din arm. Hvis der opstår en kløende rød plet eller mærke, anbefaler vi dig ikke at bruge Multi-Gyn FloraPlus.

BIVIRKNINGER

Der er ingen kendte bivirkninger. Eftersom Multi-Gyn FloraPlus har en optimal surhedsgrad (lav pH værdi) for skeden, og sædceller er basiske (høj pH værdi), kan produktet reducere sædaktiviteten. Derfor bør produktet ikke bruges under ægløsning, når du ønsker at blive gravid.

INTERAKTION MED LÆGEMIDLER

Multi-Gyn FloraPlus har ingen kendte interaktioner med lægemidler.

GRAVIDITET OG AMNING

Der er ingen kendte kontraindikationer for brug af Multi-Gyn FloraPlus under graviditet og amning. Diskuter mulighederne med din læge.

BRUG SAMMEN MED KONDOMER OG PESSARER

Effekten af Multi-Gyn FloraPlus på pessarer og kondomer kendes ikke.

OPBEVARING

Opbevar Multi-Gyn FloraPlus ved en temperatur mellem 10°C og 25°C (stuetemperatur). Opbevar Multi-Gyn FloraPlus uden for børns rækkevidde. Brug ikke Multi-Gyn FloraPlus efter udløbsdatoen.

BAGGRUNDSINFORMATION

En sund vagina har en god balance mellem forskellige bakterier - vaginalfloraen. Når det naturlige miljø eller pH værdien i skeden forstyrres, kan skadelige bakterier og mikrober trives. Forstyrrelse af denne balance bemærkes ofte af en ændring i udflød fra skeden. Mest almindeligt er bakterievækst, der er kendt som bakteriel vaginose (B.V.) og problemer med vaginal svamp (candida, thrush). Bakteriel vaginose medfører for det meste en fiskeagtig lugt, og problemer med vaginal svamp medfører kløe, brændende fornemmelse og smuldrende, hvidt udflød.

WWW.MULTI-GYN.DK

revision date: May 2020



CE 0482

TBSE1801.4

Producent:
BioClin BV, Delftechpark 55,
2628 XJ Delft, The Netherlands



SPECIFICATIONS

relation : Cosmade Belgium
description : (BIOCLIN TBSE-180I.4)
MULTI-GYN FLORAPLUS ZWEDEN 5ML
item : 71.186-3
version : /
type : folded
open format : 150 x 230 mm
finished format : 75 x 58 mm
paper : 50g thinprint
printing front : black
printing back : black
comments : created on 29/05/2020